

Snelle start gids

- 1: Zet de AED aan/uit met de groene Knop
Het display toont het gestarte scenario bij aanzetten
- 2: Plak de elektroden op het lichaam zoals aangegeven, Sluit de Gele/Roze stekker aan bij het knipperende licht
- 3: Indien schokbaar ritme druk op de knop om schok toe te dienen (Halfautomatisch)



PRECONNECTED ELEKTRODEN
Wanneer de elektroden aangesloten zitten voordat de trainer aan staat/opgestart is. Moet na het plakken van de elektroden op de afstandsbediening op knopje Elektroden "ON" worden gedrukt om door te gaan in het scenario.

Scenario	Omschrijving	Uitvoering AED Trainer
0	Ventriculaire Fibrillatie- Met single-shock conversie	Schokbaar ritme 1 schok Niet-schokbaar ritme
1	Ventriculaire Fibrillatie- Met meerdere schokken nodig voor conversie	Schokbaar ritme 4 schokken Niet-schokbaar ritme
2	Probleemoplossing skills- Defibrillatie elektrode	Slechte verbinding elektroden Schokbaar ritme 1 schok Niet-schokbaar ritme
3	Ventriculaire Fibrillatie- Met twee schokken nodig voor conversie	Schokbaar ritme 2 schokken Niet-schokbaar ritme
4	Niet-schokbaar ritme	Niet-schokbaar ritme
5	Ventriculaire Fibrillatie- Met twee schokken nodig voor conversie	Schokbaar ritme 2 schokken Niet-schokbaar ritme
6	Ventriculaire Fibrillatie- Met drie schokken nodig voor conversie	Schokbaar ritme 3 schokken Niet-schokbaar ritme
7	Probleemoplossing skills- Defibrillatie elektrodenp met twee schokken nodig voor conversie	Slechte verbinding elektroden Schokbaar ritme 2 schok Niet-schokbaar ritme
8	Ventriculaire Fibrillatie	Ventriculaire Fibrillatie
9	Probleemoplossing skills- Beweging, batterij bijna leeg, met een schok nodig voor conversie	Bewegingsdetectie Schokbaar ritme 1 schok Niet schokbaar ritme Batterij bijna leeg

Scenario nr omhoog/omlaag

Pads aangesloten voor aanzetten: Aangeven met deze knop dat de Pads goed geplakt zijn

Beweging waargenomen aan slachtoffer (display AED: "≡")

Halfautomatisch (display AED: "|")

Volautomatische AED (display AED: "| |")

Scenario selectie (knopje +/- zit ook op AED)

Tijdens ieder voorgeprogrammeerd scenario kan je het scenario anders laten verlopen door op de betreffende afstandsbediening knoppen te drukken

- Play: Hervat de activiteit na pauze
- Pauze: Pauzeert de activiteit (display AED: "| |")
- Pads goed geplakt (display AED: "|-|"), wordt gebruikt bij scenario 2 en 7
- Pads los geraakt (display AED: "|-"), AED gaat door bij opnieuw plaatsen stekker in AED
- Schokbaarritme (display AED: "c")
- Niet-schokbaarritme (display AED: "n")
- Error gesimuleerd (display AED: "E" + Piep), herstellen alleen door AED uit/aanzetten
- Lage accu spanning gesimuleerd (display AED: "|_")
AED gaat automatisch na 5 sec door met scenario